

## Recomendações para manuseamento de máscara

Ao **COLOCAR** máscara cirúrgica (ou outra) deve:



**Higienizar as mãos** com água e sabão ou solução à base de álcool.



**Posicionar a máscara** na posição correta. *A borda dobrável deve estar para cima e a parte colorida para fora.* 



Segurar máscara pelas linhas de suporte/elásticos e adaptar a cada orelha. Ajustar máscara junto ao nariz e queixo, sem tocar na face da máscara.

Ao **REMOVER** máscara cirúrgica (ou outra) deve:



**Higienizar as mãos** com água e sabão ou solução à base de álcool.



**Retirar máscara** apenas segurando nas linhas de suporte/elásticos.



Colocar a máscara no **recipiente adequado** (*resíduos de grupo III – saco branco descartável*) e **lavar novamente as mãos**.

- A máscara deverá ser colocada pelo próprio trabalhador
- Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada

Ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face.

- Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel.
- Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra